


SPECIFICHE E DATI TECNICI

MEMBRANA

| | |
|---|--|
| Materiale |  Versatile-PES® Polietersulfone (PES) + Polivinilpirrolidone (PVP) |
| Superficie di filtrazione (m ²) | 1.0 e 2.0 |
| Diametro interno (µm) | 210 ± 10 |
| Diametro esterno (µm) | 290 ± 20 |
| Spessore della parete (µm) | 40 ± 5 |
| Max TMP (mmHg) | 500 |

CARTUCCIA

| | |
|-------------------------------|---|
| Diametro interno (mm) | 32 (1.0 m ²) e 44 (2.0 m ²) |
| Materiale del potting | Poliuretano (PU) |
| Materiale di housing e ghiera | Policarbonato (PC) |
| Sterilizzazione | Raggi Beta |
| Validità sterilizzazione | 3 anni |

DEHP free | Latex free

Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso. Questo documento non ha valore contrattuale.
BRO-FRA-FRACTIOSMART-ITA REV01 - CDP021023A

FRACTIO^{smart}™

FRAZIONATORI
CON MEMBRANA

 Versatile-PES® S M L



VANTAGGI DELLA FILTRAZIONE A CASCATA

Ampi spazi di applicazione

Perdita minima di sostanze non patologiche come l'albumina

Aferesi selettiva delle componenti del plasma in base al peso molecolare

Distribuito da



Spindial S.p.A.
Strada Nazionale, 18
43044, Lemignano di Collecchio
(Parma), Italia
Tel: +39 0521 339611
Fax: +39 0521 339600



PRODUTTORE
MEDICA
SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY

MEDICA S.p.A.
Via degli Artigiani, 7
41036, Medolla (Modena)
Italia

Phone +39 0535 51159
Fax +39 0535 52605
info@medica-spa.com
www.medica-spa.com

CE 0476
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2021

 Versatile-PES® S M L

è la nuova membrana a fibre cave di Medica
sviluppata espressamente per la filtrazione del plasma.


 Versatile-PES® S M L è un marchio registrato di Medica S.p.A.

NUOVA


MEDICA
SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY

APPLICAZIONI DELLA DOPPIA FILTRAZIONE A CASCATA

FRACTIOsmart™ rimuove le componenti ad alto peso molecolare dal plasma. Immunoglobuline, crioglobuline, lipoproteine a bassa densità, virus coinvolti in malattie infiammatorie e autoimmuni e forme simili con decorsi acuti o cronici. Si consiglia l'uso di **FRACTIOsmart™** con la nostra unità di aferesi **AferSmart Plus™**

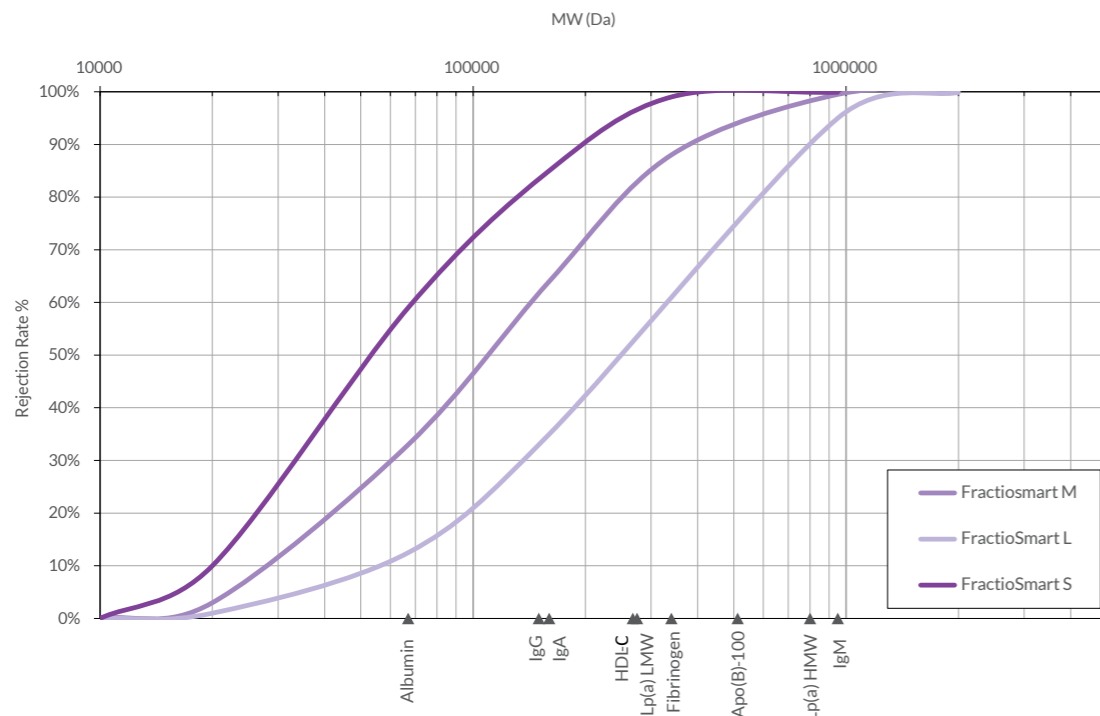

DOPPIA FILTRAZIONE A CASCATA

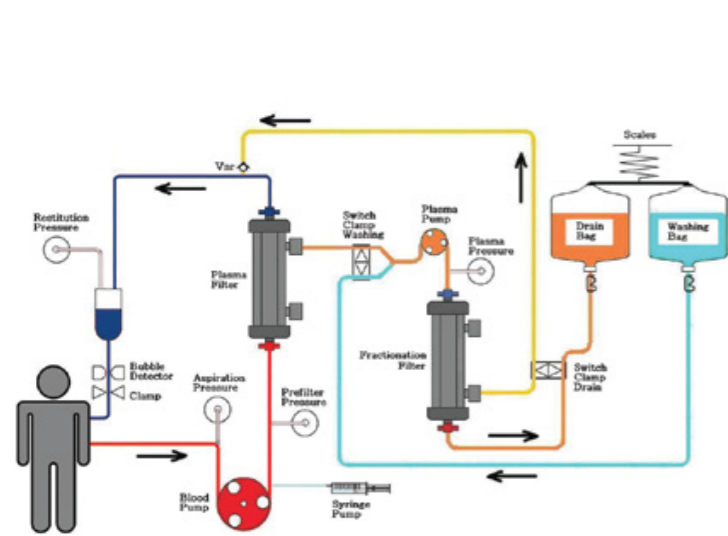


La filtrazione a cascata consiste in un sistema a doppio filtro che offre i vantaggi di una rimozione selettiva senza l'infusione di sostanze esogene. Il plasma separato viene inviato in un filtro a fibre cave con diverso cut-off nominale. La filtrazione a cascata è utilizzata con successo nella sindrome di Guillain-Barré (GBS), nella Miastenia Gravis (MG), nell'Ipercolesterolemia, nella Glomerulosclerosi segmentaria e focale (FSCS) nella Degenerazione maculare senile (AMD), nel Lupus eritematoso, nella Rabbdomiolisi, nell'insufficienza renale acuta e altro.

FRACTIOsmart™ Small



FRACTIOsmart™ Small è indicato per l'aferesi delle immunoglobuline IgG, IgA.

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice prodotto | M90149 | M90009 |
| Descrizione | FRACTIOsmart™ Small 1.0 | FRACTIOsmart™ Small 2.0 |
| Qtà/Confezione | 28 pz | 20 pz |

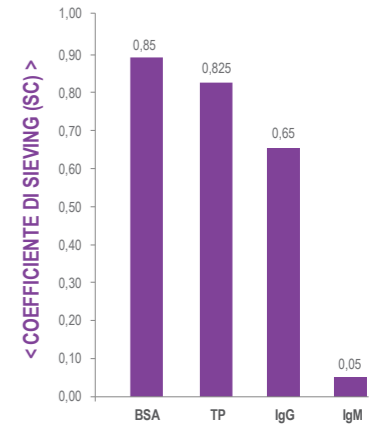


FRACTIOsmart™ Medium



FRACTIOsmart™ Medium è indicato per l'aferesi delle immunoglobuline IgM.

| | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Codice prodotto | M90150 | M90100 |
| Descrizione | FRACTIOsmart™ Medium 1.0 | FRACTIOsmart™ Medium 2.0 |
| Qtà/Confezione | 28 pz | 20 pz |

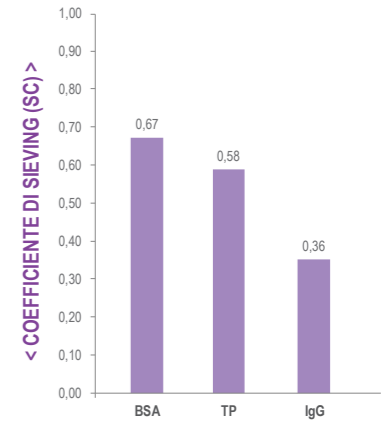

FRACTIOsmart™ Large



FRACTIOsmart™ Large è la nostra proposta per l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità LDL e Lp(a). E' indicato per il trattamento di malattie caratterizzate da una elevata concentrazione di LDL e Lp(a) come la Ipercolesterolemia familiare omozigote, quando la forma eterozigote non risponde al trattamento medico, o quando il trattamento porta a pericolosi effetti collaterali (come la Rabbdomiolisi).

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice prodotto | M90151 | M90101 |
| Descrizione | FRACTIOsmart™ Large 1.0 | FRACTIOsmart™ Large 2.0 |
| Qtà/Confezione | 28 pz | 20 pz |

